

Antes de usar, lea atentamente las instrucciones y manténgalas en un lugar seguro para futuras consultas.

## Introducción

Usar un dispositivo de alarma como el sensor de orina para tratar la enuresis nocturna puede, en la mayoría de los casos, solucionar el problema. Por medio del entrenamiento, el reflejo no existente de despertarse al tener la sensación de vejiga llena puede conseguirse.

! Por los conocimientos actuales, se puede hablar de un comportamiento normal si se moja la cama menos de dos veces por mes. !

## Datos técnicos (Sensor de orina)

Dispositivo de alarma:	28 x 40 x 85 mm (alto x ancho x largo)	Peso:	55 g
Sensor de pis:	11 x 7 x 19 mm (alto x ancho x largo)	Batería:	2x CR-2032/Lithium 3V
Longitud del sensor:	885 mm		

**Nota: Use solo el tipo de batería especificada para el sensor de orina. No use otro tipo de batería.**

HiMi.: 15,25,18,0017

PZN 0960183

## Entrega

Dispositivo de alarma (Ratón):	order-Nr. 20001	Manual de instrucciones:	order-Nr. 20005
Caja de almacenamiento:	order-Nr. 20002	Tabla del niño:	order-Nr. 20006
Paquete de baterías (2 unidades):	order-Nr. 20003	Conjunto de pegatinas:	order-Nr. 20007
Pasador de encendido:	order-Nr. 20004	Protocolo de tratamiento:	order-Nr. 20008

## Accesorios (opcional)

Cable sensor:	order-Nr. 20010	PZN 7229740
---------------	-----------------	-------------

# Instrucciones de seguridad

## Instrucciones de seguridad generales

- El fabricante no se hace responsable de cualquier daño causado por un uso incorrecto.
- Un uso incorrecto o inadecuado podría dañar el aparato y causar lesiones al usuario.
- Este aparato puede ser usado por niños de 6 años o más y personas con las capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas o por personas que carezcan de experiencia si han recibido supervisión o instrucciones sobre cómo usar el aparato de una forma segura y entienden los riesgos implicados.
- Los niños no deben jugar con el aparato. El producto no es un juguete.
- La limpieza y el mantenimiento no debe ser realizada por niños sin supervisión.
- Solo use accesorios evaluados para su uso con este producto.
- No intente introducir ningún objeto en el aparato.
- No intente abrir la carcasa.
- Solo para uso doméstico.



## El diario

El diario debe ser relleno por los padres. Hay cuatro campos disponibles por día/noche para apuntar la hora de la alarma. Para un mejor control, registre toda la información según los siguientes criterios:

**M** = mojado, vaciado completo de la vejiga en la cama.  
**RM** = ropa interior mojada.

**CM** = cama húmeda pero no mojada.  
**S** = seco.

La tabla del niño debe ser rellena por el niño. Si el niño se despierta rápidamente tras sonar la alarma (incluso con la ayuda de los padres) como premio se le permitirá pegar una pegatina en la tabla. Naturalmente, esto también se aplica en caso de que no haya sonado la alarma o si no mojó la cama. En caso de mojar la cama, se debe poner una cruz o línea.

## Aplicación

### Pasador de encendido para el dispositivo de alarma Pieselpiepser (ratón)

Para activar el dispositivo, retire el pasador de encendido del dispositivo. El dispositivo estará ahora encendido y listo para ser usado. Esto se indicará por medio de una breve iluminación de la luz indicadora roja y un sonido (solo si el dispositivo no está en modo vibración). Para apagar el dispositivo, inserte de nuevo el pasador de encendido en la apertura. El ratón (dispositivo de alarma) se desconectará de las baterías.

### Interruptor de pausa

Presione el interruptor de pausa para silenciar temporalmente la alarma. Esto interrumpe la alarma por aproximadamente 30 segundos para poder cambiar rápidamente la ropa interior o ir al baño.

**Uso:** Inserte el pasador del sensor de humedad rojo (sensor de pis) en el ratón (dispositivo de alarma). Para asegurar el cable, engánchelo por debajo de la cola del ratón. Elija el modo de alarma (se puede ajustar con el pasador de encendido en la parte posterior del dispositivo) y encienda el dispositivo.


## Alarma

Puede elegir entre tres tipos diferentes de modos de alarma:

1. Solo sonido.
2. Solo vibración.
3. (Vibración + alarma) vibración y sonido.

Tan pronto como el sensor se moja, la alarma saltará.

Ahora, el sensor mojado se debe retirar de la ropa interior y enjuague con agua tibia corriente. A continuación, séquelo completamente y engánchelo de nuevo a una nueva prenda de ropa interior.

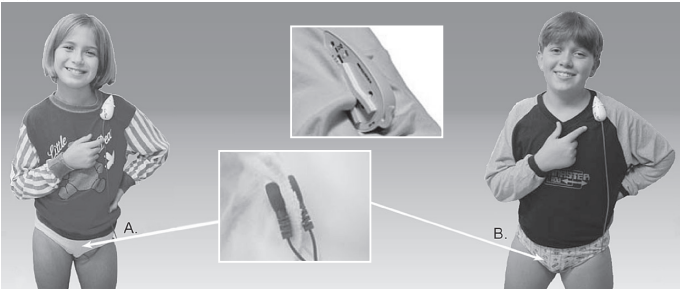

## Colocación

1. Coloque y ajuste el dispositivo de alarma en la parte superior del pijama, aproximadamente a la altura de los hombros.
2. Coloque y ajuste el sensor (sensor de pis) bajo la ropa interior.

### A. Niñas

Cerca de la vagina.

### B. Niño

Cerca del orificio del pene.

**Nota de seguridad:** Para evitar un posible estrangulamiento por el cable, asegúrese de que el cable está correctamente fijado bajo el pijama.

## 10 consejos para un entrenamiento exitoso

1. Sea paciente. El entrenamiento y resultados positivos necesitan tiempo.
2. Motive a su hijo.
3. Use el dispositivo todas las noches.
4. Comente la función y practique el cambio del sensor con su hijo en detalle.
5. Pruebe y encuentre el lugar en el que interfiere menos con el niño.
6. Antes de ir a la cama, anime a su hijo a ir al baño.
7. Al principio, la alarma a menudo no es escuchada. Despierte amablemente a su hijo durante los primeros días. Por lo general, el niño se despertará solo tras unos pocos días (objetivo intermedio).
8. Tras un tiempo, el niño debería ser capaz de apagar la alarma por sí mismo. Ayude a su hijo mientras tanto.
9. Use el diario para tener una mejor visión general de los resultados.
10. Tras un tratamiento/entrenamiento exitoso, mande el diario al fabricante. Recibirá una pequeña sorpresa como agradecimiento. Los datos serán usados solo para fines estadísticos.

## Posibles problemas y soluciones

### La alarma no suena en el dispositivo

Prueba: Presione ambos contactos en cada uno. Si la alarma suena, el dispositivo está bien.  
Causa: El sensor no está colocado correctamente.  
Solución: Vuelva a colocar el sensor.

### La alarma no suena

1. Causa: La batería está vacía.  
Solución: Cambie la batería tal y como se describe en el manual de usuario.  
2. Causa: Dispositivo defectuoso.  
Solución: Haga que el distribuidor o fabricante lo reparen.

### La alarma no suena tan fuerte como al principio

Causa: La batería está baja.  
Solución: Cambie la batería tal y como se describe en el manual de usuario.



## Cambiar la batería:

Desatornille la cubierta de la batería e inserte 2 nuevas baterías (CR-2032). Asegúrese de que las baterías están insertadas de acuerdo a su polaridad y las marcas.

### Nota:

- No mezcle baterías de diferentes tipos o baterías nuevas y usadas.
- Asegúrese de que la batería esté insertada con la polaridad de forma correcta según las marcas.
- Las baterías agotadas deben retirarse del aparato.
- Retire la batería si la unidad se va a almacenar y no ser usada por un largo periodo de tiempo.
- Asegúrese de que el terminal de suministro no está en cortocircuito.
- Las baterías no recargables no deben ser recargadas.



## Encender el dispositivo

Al recibirlo, el Pieselpiepser está equipado con un pasador de encendido que asegura que la alimentación está interrumpida. Siempre y cuando el pasador de encendido esté insertado en el Pieselpiepser, el dispositivo estará apagado. Active el dispositivo de alarma quitando el interruptor de encendido. El interruptor de encendido también se usa para seleccionar o cambiar la alarma o el modo vibración.

**Atención:** El pasador de encendido debe estar correctamente insertado.

## Nota de seguridad:

El producto contiene piezas pequeñas. No usar en niños menores de 3 años.



Las baterías estándar y recargables con un símbolo de basura común, Como consumidor, está obligado legalmente a devolver las baterías usadas para su correcta eliminación. Puede entregar las baterías usadas en los puntos de recogida públicos de su distrito o en los puntos de venta en los que este tipo de baterías se venden.

## EC Declaration of conformity

Following harmonized standards have been applied:  
EMC: EN61000-6-1, EN61000-6-3

Declaración de conformidad con el Reglamento sobre productos sanitarios (UE) 2017/745. VIII Capítulo III. El diseño del producto corresponde a la Clase I.

Osthoff-Vertretungen • Klinkerweg 4 • 40699 Erkrath  
Tel. +49 (0) 2104 94 81 81 • Fax +49 (0) 2104 94 81 93  
info@piesel-piepser.de • www.piesel-piepser.de