

Kullanmadan önce lütfen bu talimatları dikkatlice okuyun ve güvenli bir yerde, ileride okumak üzere saklayın.

Giriş

Gece altını ıslatmanın (enürezis nokturna) tedavisinde çiş sensörü gibi bir alarm cihazının kullanımı bir çok durumda sorunu çözebilir. Dolu idrar kesesi hissiyle olmayan uyanma refleksi eğitilme elde edilebilir.
! Şu ana kadar elde edilen bilgilere göre, bir ay içerisinde şayet ikiden az gece ıslatması yaşıyorsanız normal bir durum olarak sayılabilir. !

Teknik veriler (Çiş Sensörü)

Alarm cihazı: 28 x 40 x 85 mm (H x B x L)
Çiş sensörü: 11 x 7 x 19 mm (H x B x L)
Sensör Uzunluğu: 885 mm

Ağırlık: 55 g
Pil paketi: 2x CR-2032/Lithium 3V

Not: Yalnızca çiş sensörü için belirtilen pil türü kullanın. Başka tür bir pil kullanmayın
HiMi.: 15,25,18,0017 PZN 0960183

Tedarik kapsamı

Alarm cihazı (Fare): order-Nr. 20001
Saklama kutusu: order-Nr. 20002
Pil paketi 2 ad.: order-Nr. 20003
Aç/Kapa pimi: order-Nr. 20004

Kullanma kılavuzu: order-Nr. 20005
Çocuk tablosu: order-Nr. 20006
Etiket seti: order-Nr. 20007
Tedavi protokolü: order-Nr. 20008

Aksesuarlar (isteğe bağlı)

Sensör kablosu: order-Nr. 20010

PZN 7229740

Güvenlik talimatı

Genel Güvenlik Talimatları

- Üretici yanlış kullanım nedeniyle gerçekleşebilecek hasarlardan sorumlu değildir.
- Hatalı veya yanlış kullanım cihazın zarar görmesine ve de kullanıcının yaralanmasına neden olabilir.
- Bu alet, kullanıma ilişkin olarak uygun bir biçimde gerekli gözetim ve talimatlar verilmiş ve cihazın güvenli bir şekilde kullanımıyla ilgili tüm tehlikeler anlaşılmış ise, 6 yaş ve üzeri çocuklar ile fiziksel, duyuşsal veya zihinsel kabiliyetleri sınırlı veya deneyimsiz ve bilgisi olmayan kişiler tarafından da kullanılabilir.
- Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Ürün bir oyuncak değildir!
- Gözetim altında olmadıkları sürece temizleme ve kullanım bakımları çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Sadece bu ürün ile kullanılması uygun aksesuarlar kullanın.
- Hiç bir zaman cihazın içerisine herhangi bir nesne sokmaya çalışmayın.
- Hiç bir zaman gövdeyi kendi başınıza açmaya kalkışmayın.
- Yalnızca evde kullanım içindir.



Günlükler

Günlük anne baba tarafından doldurulacaktır. Alarm zamanlarının kaydedilmesi için günlük/gececik 4 alan bulunmaktadır. Daha iyi kontrol için, tüm bilgileri aşağıdaki kriterlere göre kaydedin:

I = ıslak, mesanenin hepsi yatağa boşalıyor.

YN = Yatak nemli, ancak ıslak değil

ÇI = Çamaşır ıslak

K = Kuru

Çocuk tablosu çocuk tarafından doldurulacaktır. Çocuğun alarm çaldıktan sonra hemen uyanması durumunda (anne babasının yardımıyla olsa bile) tabloya bir çakırtma yapılmamasına izin verilir. Doğal olarak aynı durum herhangi bir şekilde alarm tetiklenmediğinde ve/veya yatak ıslatılmadığında da söz konusudur. Yatak ıslatılan bir geceden sonra bir çarpı veya çizgi çizilmelidir.

Uygulama

alarm cihazı için Aç/Kapa pimi Piesel-Piepser (fare).

Cihazı etkinleştirmek için cihazdan aç/kapa pimini çıkarın. Cihaz artık açık konumdadır ve kullanıma hazırdır. Cihazın hazır olduğu kırmızı bir göstere lambasının kısa süreli yanması ve bir bip sesiyle gösterilir (Ancak sadece cihaz Titreşim moduna alınmışsa) Cihazı kapatmak için pimi tekrar boşluğa yerleştirin. Fare (alarm cihazı) ile pil bağlantısı o zaman kesilecektir.

Duraklatma düğmesi

Alarmı geçici süreliğine sessize almak için duraklatma düğmesine basın. Bu düğme, iç çamaşırının çabuk bir şekilde değiştirilmesi veya tuvalete gidilmesi için alarmı yaklaşık 30 saniye boyunca durdurur.

Çalıştırma: Kırmızı ıslaklık sensörünün (çiş sensörü) pimini fareye (alarm cihazı) takın, Kabloyu sabitlemek için onu farenin kuyruğunun alt kısmına tutturun. Alarm modunu seçin (cihazın arka tarafında bulunan aç/kapa pimiyle ayarlanabilir) ve cihazı çalıştırın.

Alarm

Üç farklı alarm modu arasından istediğinizi seçebilirsiniz:

1. Yalnızca bip sesi
2. Yalnızca titreşim
3. (Titreşim+Alarm) Titreşim ve bip sesi

Sensör ıslanır ıslanmaz alarm tetiklenecektir.

Şimdi artık ıslak sensör ıslak iç çamaşırından çıkarılmalı ve ılık akan suyun altında durulayın. Daha sonra, sensörü iyice kurulayın ve yeniden temiz bir iç çamaşırın içerisine takın.



1. Alarm cihazı pijamanın üst kısmına yaklaşık omuz yüksekliğine takarak sabitleyin.
2. Sensörü (çiş sensörü) iç çamaşırının içerisine takın ve sabitleyin.

A. Kız.

B. Erkek.

Cinsel organa yakın.

Penis ucuna yakın.

Güvenlik Notu: Kablonun düğümlemesini önlemek için lütfen kablonun pijamanın alt tarafına uygun şekilde yerleştirildiğinden emin olun.

Başarılı eğitim için 10 ipucu

1. Sabırlı olun. Eğitim ve pozitif sonuçlar zaman ister.
2. Çocuğunuzu motive edin.
3. Cihazı her gece kullanın.
4. Çocuğunuzla cihazın işlevi hakkında detaylı olarak konuşun ve sensörün nasıl değiştirileceği pratiği yapın.
5. Çocuğunuzu en az rahatsız ettiği yeri deneyerek bulun.
6. Yatağa gitmeden önce, çocuğunuzu tuvaleti kullanmaya teşvik edin.
7. En başlarda alarm hemen hemen hiç duyulacaktır. Lütfen ilk bir kaç gün boyunca çocuğunuzu uyandırın. Genellikle, bir kaç gün sonra çocuk kendiliğinden uyanmaya başlayacaktır (ara hedef).
8. Bir süre sonra çocuk kendi başına alarmı kapatabilecektir. Bu arada çocuğunuzun yardımını kullanın.
9. Elde edilen sonuçlara ilişkin daha iyi bir değerlendirme yapabilmek için ekli günlükleri kullanın.
10. Başarılı tedavi / eğitimin sonra lütfen günlükleri üreticiye gönderin. TEŞEKKÜR olarak küçük bir sürpriz alacaksınız. Veriler sadece istatistiksel amaçlı kullanılacaktır.

Olası arzular ve sorun giderme

Cihaz alarm sesi çıkarmıyor

Fonksiyon testi: Her iki temas noktasına da aynı anda basın – alarm sesi çıkacaktır. Cihaz, Tamam

Neden: Sensör doğru yerleştirilmemiş.

Çözüm: Sensörü yeniden yerleştirin.

Uyandırma sinyali çalışmıyor

1.Neden: Pil boş.

Çözüm: Kullanıcı Kılavuzunda açıklandığı gibi pili değiştirin.

2. Neden: Cihaz arızalı.

Çözüm: Tamir için yetkili satıcı veya üreticiye verin.

Alarm başlarda olduğu kadar güçlü değil

Neden: Pil zayıf.

Çözüm: Kullanıcı Kılavuzunda açıklandığı gibi pilleri değiştirin.



Pil değişimi:

Pil kapağını çıkartın ve 2 yeni pil takın (CR-2032). Pillerin kutuplarına ve işaretlerine göre yerleştirildiğinden emin olun.

Not:

- Farklı türdeki veya yeni ve kullanılmış pilleri karıştırmayın
- Pilin işaretlere göre doğru kutup olacak şekilde yerleştirildiğinden emin olun
- Bitmiş pillerin cihazdan çıkarılması gerekmektedir
- Eğer cihaz uzun bir süre boyunca kullanılmıyorsa pil çıkarın
- Tedarik terminalerinin kısa devre olmadığından emin olun
- Şarj edilebilir olmayan piller yeniden şarj edilmez.

Cihazın çalıştırılması

Piesel Piepser, gücün kesilmesini engelleyen bir aç/kapa pimiyle birlikte satılmaktadır. Aç/kapa pimi Piesel Piepser'e yerleştirildiği sürece cihaz kapalı kalacaktır. Alarm cihazı aç/kapa pimini çıkararak aktif hale getirebilirsiniz. Aç/kapa düğmesi ayrıca alarm/titreşim modunu seçmek/değiştirmek için de kullanılır. Dikkat: Aç/kapa pimi uygun şekilde yerleştirilmelidir.

Güvenlik Notu:

Ürün küçük parçalar içermektedir. 3 yaşından küçük çocuklarda kullanmayın.



Standart şarj edilebilir piller normal evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır. Tüketici olarak kullanılan pillerin uygun şekilde atılmaları için iadesinden yasal olarak sorumlusunuz. Kullanılmış pillerinizi bulduğunuz bölgedeki toplama noktalarına veya bu tür pillerin satışının yapıldığı satış noktalarına bırakabilirsiniz.

Uygunluk beyanı

Aşağıdaki harmonize edilmiş standartlar uygulanmıştır:

EMC: EN61000-6-1, EN61000-6-3

Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği (AB) 2017/745 anlamında

III Bölüm B.

Ürünün tasarımı Sınıf I'e karşılık gelir.

Osthoff-Vertretungen • Klinkerweg 4 • 40699 Erkrath
Tel. +49 (0) 2104 94 81 81 • Fax +49 (0) 2104 94 81 93
info@piesel-piepser.de • www.piesel-piepser.de