

Instructions de sécurité

Instructions générales de sécurité

- Le fabricant ne prend aucune responsabilité pour tout dommage causé par une utilisation incorrecte.
- Une utilisation incorrecte ou inappropriée peut endommager l'appareil et causer des blessures à l'utilisateur.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 6 ans et plus et des personnes avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou par celles ayant un manque d'expérience et de connaissances que si elles ont subi une supervision ou une formation concernant l'utilisation de l'appareil d'une manière sûre et si elles ont compris les risques impliqués
- Le produit contient des petites pièces. **Sous aucun prétexte les enfants ne doivent jouer avec l'appareil. Ce produit n'est pas un jouet !**
- Le nettoyage et l'entretien **ne doivent pas** être fait par des enfants sans surveillance
- Utilisez uniquement des accessoires testés pour une utilisation avec ce produit
- N'essayez jamais d'introduire des objets dans l'appareil.
- N'essayez jamais d'ouvrir le boîtier par vous-même!
- Uniquement pour un usage domestique

Remarques sur la manipulation des piles

- ! AVERTISSEMENT :**
- Les piles ne doivent pas être rechargées, démontées, jetées dans un feu ouvert ou court-circuitées. **Danger, il y a un risque d'incendie / d'explosion !**
 - Gardez les piles hors de portée des enfants en bas âge. **Les piles ne sont pas des jouets !**
 - Avaler des piles peut être extrêmement dangereux. Si un enfant avale une pile, consultez immédiatement un médecin.
 - Si une pile fuit, évitez tout contact avec les yeux et la peau. **Si le liquide entre en contact avec les yeux ou la peau, rincez à l'eau immédiatement et consultez un médecin si nécessaire.**

Attention: remplacez toujours toutes les piles en même temps et utilisez toujours le même type de pile.

Les piles peuvent contenir des toxines nocives pour la santé et l'environnement. Éliminez toujours les piles conformément aux réglementations légales en vigueur.

Ne jetez pas les piles avec les ordures ménagères dites « normales ».

Avant utilisation, veuillez lire attentivement ces instructions et conservez-les dans un endroit sûr pour référence ultérieure.

Introduction

Le traitement de l'incontinence ou d'énurésie nocturne (terme technique : énurésie nocturne) avec un dispositif d'alarme lors du mouillage du lit qui se fait ici grâce au capteur d'urine, peut être une solution au problème.

Grâce à l'apprentissage, le réflexe inexistant de se réveiller en raison de la pression de la vessie est acquis petit à petit.

Selon les connaissances acquises aujourd'hui, moins de deux incidents de « mouillage » du lit par mois est considéré comme normal !

Données techniques

Piepsel Piepsel (capteur d'urine) HiMIN: 15.25.18.0027 PZN: (07232676)
 Dimension du récepteur: 90 x 60 x 30 mm (H x B x T) Poids: 45 g
 Dimension de l'émetteur: 55 x 30 x 8 mm (H x B x T) Poids: 8 g
 Pile: 1 x CR2032 Lithium (3,0 V), 3 x AAA (1,5 V)

Remarque: Utilisez uniquement le type de pile spécifié pour le capteur d'urine. N'utilisez aucun autre type de pile.

Contenu de l'appareil

Ensemble du capteur d'urine

Piles

Broche de mise en marche ON / arrêt OFF x 2 pièces

Instructions d'utilisation


Le journal de l'enfant

Jeu d'autocollants

Le journal des parents

Tournevis

Pièce en plastique

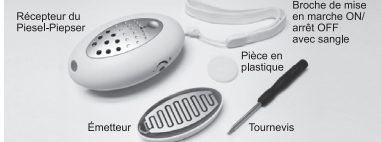

Les journaux

Le journal des parents doit être rempli par les parents. 4 colonnes sont disponibles pour chaque jour / nuit. Pour un meilleur contrôle, des informations détaillées doivent être saisies selon les critères suivants :

W = mouillé, la vessie se vidant complètement dans le lit BM = lit humide mais pas mouillé
 U = sous-vêtements mouillés D = Sec

Le journal de l'enfant doit être complété par l'enfant. L'enfant devra recevoir un autocollant en guise de récompense s'il reste sec toute la nuit ou si aucune alarme ne s'est déclenchée. Si le lit est humide, l'enfant devra marquer d'un X au stylo dans son journal.

Allumer l'appareil



À la livraison, la broche de mise en marche / arrêt (On/Off) est insérée dans l'appareil pour s'assurer que l'alimentation électrique est interrompue. Tant que la broche on / off est insérée dans le récepteur, l'appareil est éteint.

Sélectionnez le mode d'alarme souhaité (vibre uniquement, vibreur + son ou son uniquement).

Activez le récepteur en enlevant la broche On / Off.

Attention: la broche On / Off doit être retirée avant utilisation

Remarque: ce produit peut ne pas fonctionner correctement lorsqu'il subit une décharge électrostatique. Dans ce cas, réinitialisez-le manuellement.

Fonctionnement

Insérez 3 piles AAA dans le récepteur et 1 pile bouton CR2032 dans l'émetteur.

Remarque : assurez-vous que la bague d'étañchement orange de l'émetteur soit correctement positionnée.

Lorsque vous retirez l'interrupteur marche/arrêt à broches, le voyant LED vert s'allumera pendant environ 3 secondes. L'appareil est maintenant prêt à être utilisé.

Couplage-Remarque (uniquement pour la première connexion) « Pause/Couplage »

Pour effectuer le couplage Bluetooth, vous devez appuyer sur le bouton Pause/Couplage à trois reprises dans une coupure très courte.

L'émetteur/les émetteurs dans un rayon < 10m seront couplés.

Remarque 1: connectez uniquement 1 émetteur et 1 récepteur pendant le processus de couplage. Le couplage de plusieurs unités pourrait perturber le processus de couplage.

Remarque 2: en cas de problème lors du couplage, maintenez le bouton Pause enfoncé pendant 10 secondes jusqu'à ce que le récepteur clignote et vibre deux fois. Cela réinitialisera la mémoire. Ensuite, essayez de nouveau de coupler l'appareil.

2. Pour vérifier l'état de couplage, appuyez deux fois sur le bouton Couplage. Le voyant LED clignotera 4 fois si la connexion a réussi.

3. L'insertion de l'interrupteur marche/arrêt à broches pendant le processus de couplage peut provoquer un dysfonctionnement.

4. L'émetteur et le récepteur couplés prendront environ 30 secondes pour se reconnecter une fois que l'interrupteur marche/arrêt à broches est débranché.

5. Si la connexion est rompue, le récepteur clignote en vert si la connexion à l'émetteur est perdue. Le clignotement s'arrête après 3 à 5 secondes dès que la connexion est rétablie.

Une fois que l'émetteur est mouillé, l'alarme sera activée. Le voyant LED rouge de l'émetteur clignotera 3 fois et activera l'alarme du récepteur dans les 5 secondes qui suivent.

Si l'émetteur n'est pas retiré du sous-vêtement humide, l'alarme s'activera toutes les minutes.

Retirez l'émetteur des sous-vêtements mouillés, nettoyez-le avec un chiffon humide et séchez-le correctement.

Réinsérez l'émetteur comme décrit ci-dessous.

Dès que l'alarme est déclenchée, le voyant LED vert clignotera pendant 2 minutes puis restera allumer après 30 secondes.

Appuyez sur le bouton Pause pour couper temporairement l'alarme

(l'alarme sera désactivée pendant environ 30 secondes).

Remarque : l'alarme n'est complètement désactivée que lorsque l'interrupteur marche/arrêt à broches est inséré.

Le volume du récepteur peut être réglé avec le bouton de volume. Testez le volume avant de l'utiliser.

AVERTISSEMENT : le volume de l'alarme peut atteindre 100 dB sur une distance de 30 cm. Pour éviter tout risque de perte auditive, **NE JAMAIS** placer le récepteur près de votre oreille !! Le volume ne doit être réglé qu'avec le tournevis. **Toujours** le bouton de volume avec précaution pour éviter tout dommage.



Comment attacher l'appareil

1. Sélectionnez le mode d'alarme

- Son uniquement
- Vibreur uniquement
- Vibreur + son

2. Placez et fixez l'émetteur dans le sous-vêtement (voir photo).

REMARQUE: Il est recommandé d'insérer l'émetteur dans un protège-slip commun afin d'éviter tout contact direct avec la peau.

Un contact direct avec la peau peut alors tromper le capteur et donc activer l'alarme. Il peut aussi entraîner une éruption cutanée sur une peau très sensible.

3. Faites attention au signal du récepteur !

Remarque: lorsque le niveau de la pile est faible, un signal de rappel retentira.

Récepteur: le voyant LED rouge clignote toutes les secondes

Émetteur: le voyant LED rouge clignote toutes les 5 secondes. Après 5 minutes, le voyant LED rouge clignote toutes les 10 à 20 secondes.

10 conseils pour un apprentissage réussi

1. Soyez patient ! L'apprentissage et l'obtention de résultats positifs prennent du temps !
2. Motivez votre enfant.
3. Le capteur d'urine doit être utilisé tous les soirs.
4. Discutez de la fonction du capteur et apprenez comment changer le capteur en détail avec votre enfant.
5. Découvrez, où le placement de l'appareil est le moins déplaisant pour votre enfant.
6. Encouragez votre enfant à aller aux toilettes avant de se coucher.
7. Dans la phase initiale, l'alarme n'est souvent pas entendue par l'enfant. Par conséquent, réveillez votre enfant durant les premiers jours. Après quelques jours, la plupart des enfants se réveillent par eux-mêmes.
8. Après un certain temps, l'enfant devra être capable d'éteindre l'alarme de façon indépendante. Aidez-le / la jusqu'à ce que ce point soit atteint.
9. Les journaux ci-joints vous aideront à suivre l'utilisation de l'appareil.
10. Après un traitement réussi, veuillez envoyer le journal au distributeur. Vous recevrez une petite surprise en guise de remerciement ! Les données sont utilisées pour but statistique seulement.

Les défaillances possibles et les solutions préconisées

Le récepteur ne déclenche pas d'alarme
 Examen: test de fonctionnement par déclenchement (chiffon humide ou trombone reliant le blindage du contact) l'émetteur, vérifiez si le voyant LED des capteurs clignote (photo)

Cause 1: l'émetteur est placé trop profondément dans le protège-slip.

Solution préconisée: déplacez l'émetteur.

Cause 2: la pile est vide.

Solution préconisée: remplacez la pile comme décrit dans les instructions.

Cause 3: l'appareil est défectueux

Solution préconisée: faites-le réparer par le revendeur ou le fabricant.

Cause 4: le niveau de la pile est faible. Le son de l'alarme est trop faible.

Solution préconisée: remplacez la pile comme décrit dans les instructions.

Remplacement de la pile

Récepteur: dévissez le couvercle de la pile et remplacez-les par 3 nouvelles piles (type : AAA)

Émetteur: dévissez le couvercle de la pile à l'aide de la pièce en plastique fournie et remplacez par 1 pile (type : CR2032)

Remarque:

- Ne mélangez pas les différents types de piles ou celles qui sont neuves et usagées

- Assurez-vous que la pile soit insérée avec la correcte polarité selon le marquage


- Les piles usagées doivent être retirés de l'appareil

- Retirez les piles si l'appareil n'est gardé inutilisé pendant une longue période de temps

- Assurez-vous que les bornes d'alimentation ne sont pas en court-circuit

- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées;

- Assurez-vous que la bague d'étañchement O de l'émetteur soit correctement installée

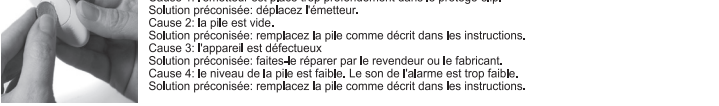

Nettoyage et entretien

Avant de nettoyer, éteignez toujours l'appareil et retirez les piles. Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau.

Nettoyez le corps de l'appareil avec un chiffon doux humidifié.

N'utilisez pas de produits nettoyants agressifs et / ou d'autres objets durs pour nettoyer l'appareil.

Information relative à la mise au rebut

Les piles standard et rechargeables ne doivent pas être jetées dans les ordures ménagères. En tant que consommateur, vous êtes légalement obligé de retourner les piles usagées pour une élimination appropriée.

Vous pouvez remettre vos piles usagées dans les points de collecte publics de votre quartier ou dans les points de vente où des piles de ce type sont vendues.

Remarque: les codes ci-dessous sont imprimés sur des piles pour indiquer qu'elles contiennent des substances nocives :

Pb = La pile contient du plomb

Cd = La pile contient du cadmium

Hg = La pile contient du mercure

Les appareils électriques usagés portent ce symbole ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères, mais doivent être collectés séparément. Par conséquent, veuillez renvoyer cet appareil à la fin de son cycle de vie à des points de collecte spéciaux ou à votre revendeur local.

Déclaration de conformité
 Classe de protection I
Piepsel-Piepsel (capteur d'urine)
 Ce produit est développé, conçu et fabriqué conformément à la directive européenne sur les équipements radio (2014/53/EU), sous la seule responsabilité de
 Osthoff-Vertrteilungen, Eintrachtstr. 41, 40699 Erkrath
 Les normes harmonisées suivantes ont été appliquées :
 EN 301489
 EN 300328
 EN 62479
 EN 60529